


Внезапная остановка сердца

При отсутствии у пациента сознания и дыхания немедленно **вызывай скорую помощь** и начинай непрямой массаж сердца. Попроси окружающих принести дефибрилятор.


1. Включи FR3 дефибрилятор.



2. Открой серую коробочку с электродами.

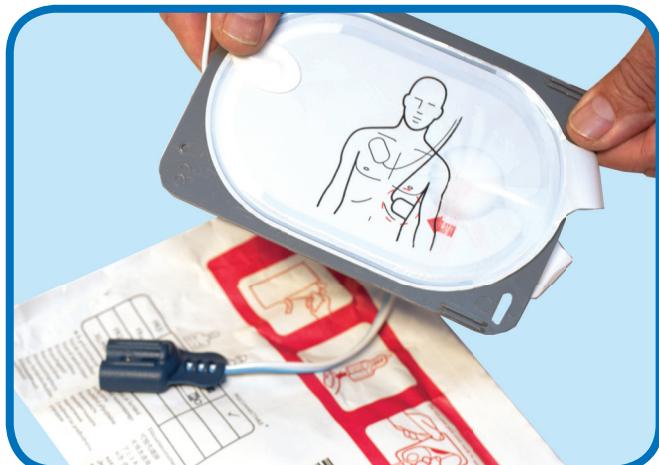

3. Прикрепи электроды к грудной клетке пациента (как показано на рисунке).

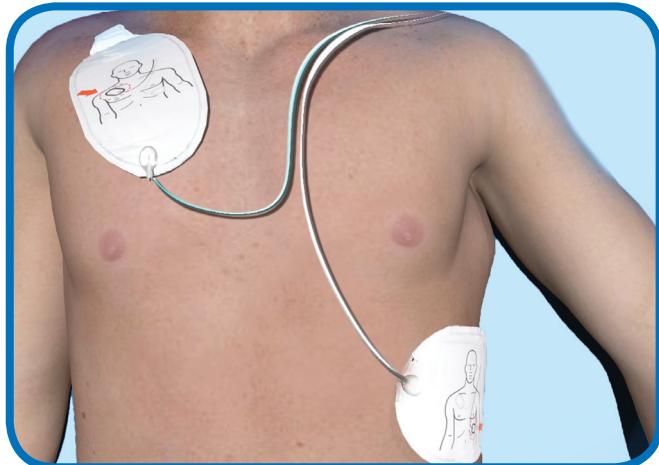

4. К пациенту **нельзя прикасаться** всё время, пока дефибрилятор анализирует ритм.

5. Нажми мигающую оранжевую кнопку, если аппарат рекомендует дефибриляцию. **НЕ ПРИКАСАЙСЯ** к пациенту во время дефибриляции.



6. Продолжай без промедления непрямой массаж сердца. В дальнейшем следуй инструкциям аппарата.



Реанимацию можно прекратить когда получишь соответствующее разрешение или если дыхание пациента восстановилось, или собственные силы на исходе.



Ты можешь загрузить в телефон при помощи QR-кода инструкцию по сердечно-лёгочной реанимации и просмотреть обучающее видео.

 tammed®